

Cedis spray sans gaz de désinfection avec atomiseur eC3.7, 30 ml

Le Cedis spray sans gaz de désinfection avec atomiseur eC3.7, 30 ml permet d'enlever les impuretés qui se déposent quotidiennement sur votre appareil auditif.



Marque : Cedis

Référence : 86704

Points de fidélité offerts : 29

Prix : 7.00 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : désinfection, anti cérumen

Spray à pompe sans gaz

Spray à pompe sans gaz pour désinfecter un appareil auditif.

Spray prêt à l'emploi pour le nettoyage et désinfection (bactéricide, fongicide et hépatovirucide) pour des systèmes auditifs et des embouts.

Laisser agir : 1 minute. Sans propulseur.

Comment utiliser le spray nettoyant pour appareil auditif ?

Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos aides auditives afin d'enlever les impuretés qui se déposent quotidiennement sur votre appareil auditif.

Appliquer en pulvérisant la solution désinfectante sur un chiffon propre puis frotter l'embout de votre contour d'oreille ou intra pour en enlever toutes les impuretés. Attention, ne pas pulvériser avec la solution désinfectante l'entrée du microphone ni la sortie de l'écouteur de votre appareil auditif.

Contenu du colis :

1 x spray nettoyant et désinfectant pour appareil auditif 30ml.

[Lien vers la fiche du produit](#)