


Comprimés nettoyants effervescents Effer'net pour appareil auditif

20 Comprimés nettoyants effervescents Effer'net pour appareil auditif

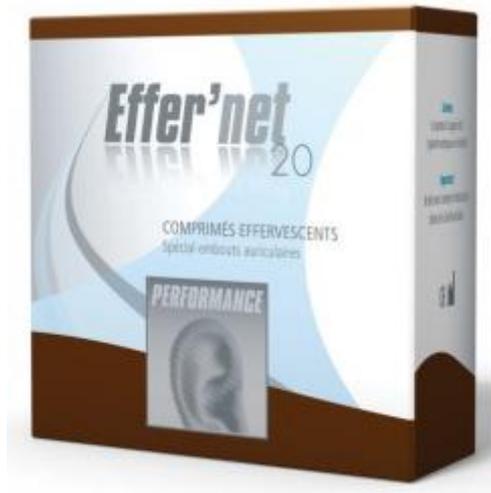

Référence : EFFPA

Points de fidélité offerts : 22

Prix : 6.90 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage

Pastille nettoyante effervescente

Comprimé nettoyant effervescent Effer'net pour appareil auditif

Le comprimé nettoyant effervescent pour appareil auditif permet déliminer le cérumen accumulé dans les aides auditives.

Comment utiliser le comprimé nettoyant pour appareil auditif ?

Dissoudre le comprimé dans de l'eau tiède dans le gobelet.

Détacher l'embout de votre appareil auditif.

Plonger l'embout de votre prothèse auditive dans la solution et laisser agir 15 minutes.

Sortir l'embout du gobelet, rincer à l'eau tiède puis l'essuyer avec un chiffon propre.

Sécher l'intérieur du tube de l'embout en soufflant à l'aide d'un spray, d'une bombe de séchage ou d'une poire soufflante.

Repositionner l'embout sur le coude de votre appareil auditif.

Il est conseillé d'utilisé un comprimé nettoyant effervescent pour appareil auditif une fois par semaine.

Contenu :

20 comprimés nettoyants effervescents Effer'net pour appareil auditif.

[Lien vers la fiche du produit](#)