

Dôme ouvert miniFit 8mm appareil auditif OTICON

Dôme ouvert miniFit 8mm appareil auditif OTICON Pack de 10 tétines Oticon ouvertes Dômes 8mm



Marque : Oticon

Référence : 125925

Points de fidélité offerts : 48

Prix : 12.00 €

Critères associés :

Pièce détachée appareil auditif : Dome appareil auditif Oticon

Dôme ouvert miniFit 8mm appareil auditif OTICON

Dôme ouvert miniFit 8mm appareil auditif OTICON

Pack de 10 tétines Oticon

Diamètre collerette extérieure 8mm

Exclusif pour les modèles Oticon suivants :

Les Dômes Oticon ouverts miniFit équipent les aides auditives avec écouteurs déportés DesignRITE, miniRITE et tubes RITE (Oticon Ria, Ria2, Nera, Nera2, Alta et Alta2)

Entretien quotidien du dôme pour appareil auditif Oticon :

Nettoyez chaque jour l'écouteur. Utilisez le chiffon et éliminez toute trace de cérumen. Le dôme ne doit pas être nettoyé. Lorsque vous désirez en avoir un propre, retirez le dôme existant et placez-en un nouveau.

Oticon et www.meilleureaudition.fr conseillons de changer le dôme au moins une fois par mois ou selon les conseils de votre audioprothésiste.

Changement du dôme pour appareil auditif Oticon :

Le dôme est simple à changer. Utilisez un ongle et tenez le bout du dôme. Retirez-le. Placez le nouveau dôme sur l'écouteur et vérifiez qu'il est solidement attaché.

[Lien vers la fiche du produit](#)