

Filtre Pare cérumen ProWax miniFit pour appareil auditif OTICON

Le filtre Pare cérumen ProWax miniFit OTICON empêche le cérumen de se stocker dans votre appareil auditif. Convient aux appareils auditifs contour d'oreille Oticon avec écouteur déporté.



Marque : Oticon

Référence : 128057

Points de fidélité offerts : 50

Prix : 9.90 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage

Filtre Pare cérumen ProWax miniFit

Filtre Pare cérumen ProWax miniFit pour appareil auditif OTICON

Convient aux appareils auditifs de marque Oticon contour d'oreille avec écouteur déporté.

A quoi sert le filtre Pare Cérumen ProWax pour appareil auditif OTICON ?

Vos conduits auditifs produisent du cérumen qui pourrait obstruer l'embout ou la sortie du son de votre appareil auditif. Le cérumen est l'une des principales causes engendrant des dysfonctionnements de l'aide auditive. La plupart des aides auditives sont vendues avec un pare-cérumen ou un autre dispositif empêchant le cérumen d'entrer dans l'appareil auditif.

Utilisez le système de protection contre le cérumen et les outils nécessaires à l'entretien à votre appareil auditif.

Remarque importante sur les prothèses auditives OTICON :

Si votre appareil auditif est équipé de MicroWaxBuster, WaxBuster ou WaxTrap, n'essayez pas de retirer ni de remplacer le filtre par vous-même. En cas de doute sur l'utilisation ou le remplacement de votre système de protection contre le cérumen, contactez votre Audioprothésiste.

Comment changer un filtre ProWax pour aide auditive:

Retirer l'outil de son emballage. L'outil a deux bras, un avec le nouveau pare-cérumen et l'autre avec l'outil de retrait.

Pousser l'outil de retrait dans le pare-cérumen existant et retirer celui-ci de l'appareil auditif.

Pousser le nouveau pare-cérumen dans l'aide auditive.

Jeter l'outil utilisé.

Le contenu du pack Filte Pare Cérumen pour aide auditive OTICON :

1x pack de 6 paniers blanc anti cérumen

[Lien vers la fiche du produit](#)