


Filtre pare cérumen ProWax pour aide auditive Oticon

Filtre pare cérumen ProWax pour aide auditive Oticon. Oticon ProWax protège du cérumen votre intra-auriculaire Oticon. ProWax est une tortue de 6 pièces.

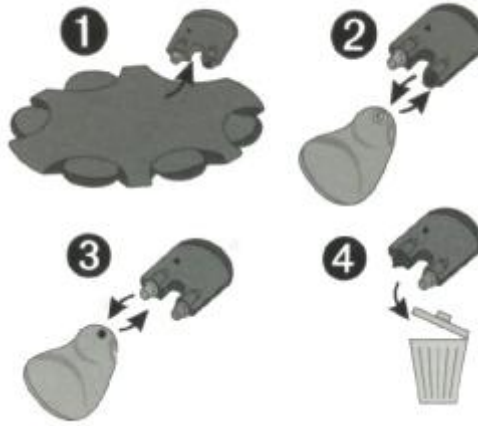

Marque : Oticon

Référence : 123367

Prix : 9.90 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen

Entretenir : Débouchage

Filtre Oticon ProWax

Filtre pare cérumen ProWax pour aide auditive Oticon

Une tortue de 6 filtres pare cérumen Oticon ProWax.

?A quoi sert le filtre pare cérumen ProWax pour appareil auditif Oticon ?

Le cérumen et l'humidité sont les deux principales causes du mauvais fonctionnement de vos prothèses auditives. Le filtre pare cérumen ProWax Oticon empêche le cérumen et l'humidité de se stocker dans vos aides auditives. La durée d'un filtre pare cérumen ProWax d'un appareil auditif varie selon vos conditions d'utilisations mais aussi de la production de cérumen.

Il est conseillé de remplacer le pare cérumen de vos aides auditives lorsque vous ressentez une baisse d'efficacité et de qualité de son de vos appareils auditifs.

?Comment utiliser le pare cérumen ProWax pour aide auditive Oticon ?

Retirer l'outil de son emballage.L'outil a deux bras, un avec le nouveau pare-cérumen et l'autre avec l'outil de retrait.

Pousser l'outil de retrait dans le pare-cérumen existant et retirer celui-ci de l'appareil auditif.

Pousser le nouveau pare-cérumen dans l'aide auditive.

Jeter l'outil utilisé.

Le contenu du pack Filtre Pare Cérumen ProWax pour aide auditive Oticon :

1x pack de 6 paniers blanc anti cérumen ProWax

[Lien vers la fiche du produit](#)