


Gobelet de séchage Hydrason 70g pour appareil auditif

Gobelet de séchage Hydrason 70g pour appareil auditif évite l'accumulation d'humidité et préserve vos appareils auditifs

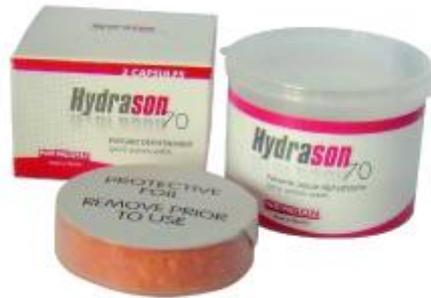

Référence : HYD70

Points de fidélité offerts : 22

Prix : 10.99 €

Hydrason 70gr

Gobelet de séchage Hydrason 70gr

Le gobelet de séchage Hydrason retire l'humidité des appareils auditifs.

Le gobelet de séchage Hydrason est muni d'une capsule désydratante qui absorbe l'humidité accumulée au cours de la journée dans vos appareils auditifs. L'humidité provoquée par la transpiration ou la condensation est l'une des premières causes de panne des prothèses auditives. En effet, l'humidité installée dans les tubes des contours d'oreilles provoque une baisse de l'intensité des appareils auditifs empêchant ainsi le son de sortir.

Comment utiliser le gobelet de séchage Hydrason pour aide auditive ?

Tous les soirs, placer vos appareils auditifs dans le gobelet de séchage Hydrason pour appareil auditif muni de la capsule désydratante orange.

Positionner la capsule désydratante au fond du gobelet de séchage Hydrason pour appareil auditif, retirer le film de sécurité, placer les prothèses auditives puis refermer le gobelet de séchage. La durée de vie de la capsule désydratante est de 6 mois.

[Lien vers la fiche du produit](#)