

Anti cerumen Cerustop pour appareil auditif

Filtre Anti cérumen CeruStop pour appareil auditif. Le filtre anti cérumen Cerustop est une solution pour l'entretien de vos prothèses auditives.



Marque : Phonak

Référence : 0980282

Points de fidélité offerts : 50

Prix : 7.77 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage

CeruStop

Anti cérumen CeruStop pour appareil auditif

Le cérumen est très souvent la première cause de mauvais fonctionnement ou voir de panne de vos aides auditives. Le filtre anti cérumen Cerustop permet de stocker le cérumen dans un petit panier afin que le cérumen ne bloque pas l'écouteur de votre aide auditive. Le filtre anti cérumen Cerustop est une solution pour l'entretien de vos prothèses auditives.

Le filtre anti cérumen Cerustop est destiné au appareil auditif intra auriculaire , idéal pour appareil auditif à écouteur déporté et convient aux appareils auditifs Phonak

Comment utiliser le filtre anti cerumen Cerustop pour vos appareils auditifs?

?L'étui des filtres anti cérumen Cérustop pour appareil auditif est composé de 8 battonnets individuels comportant chacun un panier blanc.

?Saisir un battonnet, puis retirer le filtre usagé à l'aide de l'outil de retrait. Insérer le nouveau panier blanc sur l'écouteur de votre appareil auditif puis retirer le délicatement pour le positionner.

Le contenu du pack Anti cérumen Cérustop :

Pack de 8 paniers blanc anti cérumen CéruStop

Etui de rangement

[Lien vers la fiche du produit](#)