

Cedis Gel à aloe vera pour le conduit auditif eSC2.3, tube de 5 ml

Cedis Gel à Aloe Vera pour le conduit auditif eSC2.3, tube de 5 ml. Le gel Aloé Vera hydrate, asséni et apaise le conduit auditif. Le gel permet une insertion rapide et confortable de votre appareil.



Marque : Cedis

Référence : 31880

Points de fidélité offerts : 15

Prix : 5.00 €

Critères associés :

Entretien : Désinfection

Gel à l'aloé vera

Tube de gel à l'aloé vera pour l'hygiène du conduit auditif.

Gel de soins avec effet bien-être. Le gel de soins de la peau avec Aloe Vera prévient une irritation et simplifie le placement de l'embout. La peau absorbe le gel. L'usage du gel avant et après l'utilisation de l'appareil auditif rend le port de l'embout plus confortable.

Comment utiliser le gel Aloé Vera pour le conduit auditif ?

Le gel à l'aloé Vera asséni, hydrate et apaise l'épiderme de votre conduit auditif. Appliquer le gel à Aloé Vera pour faciliter l'insertion de votre appareil auditif dans votre conduit auditif. Les propriétés de l'Aloé Vera sont multiples et est idéalement indiqué pour hydrater et assainir votre conduit

auditif .

Appliquer le gel sur le bord de votre conduit auditif. Vous pouvez déposer un peu de gel directement sur la coque de votre intra auriculaire ou sur la surface de votre embout pour que le gel se dépose directement au bon endroit de votre conduit auditif lorsque vous insérez votre appareil auditif. Il faut faire attention à ne pas obstruer les orifices de votre appareil auditif avec le gel.

Contenu du colis :

1 x Tube gel Aloe Vera 5 ml

[Lien vers la fiche du produit](#)