

Cedis sachet 10 fils d'hygiène pour tube fin eT3.3

Le fil de nettoyage pour un appareil auditif ayant un tube fin permet d'entretenir nettoyer l'intérieur du tube de votre aide auditive.



Marque : Cedis

Référence : 78039

Points de fidélité offerts : 36

Prix : 5.90 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage

fils de nettoyage

Sachet de 10 fils de nettoyage de tube fin d'appareil auditif.

Le fil de nettoyage pour un appareil auditif ayant un tube fin permet d'entretenir nettoyer l'intérieur du tube de votre aide auditive.

Comment utiliser le fil de nettoyage pour tube fin d'appareil auditif ?

Dévisser le tube de votre aide auditive puis insérer le fil fin d'un côté du tube et le poussant jusqu'à ce qu'il en sorte à l'autre extrémité. Le fil est constitué de deux parties, les extrémités en fil fin pour permettre son insertion facile puis une partie plus épaisse en mousse pour absorber l'humidité et frotter l'intérieur du tube acoustique de votre appareil auditif pour en assurer son hygiène.

Le résultat est impeccable et toutes les impuretés du tube acoustique de votre appareil auditif sont enlevées par le fil fin de nettoyage à usage unique.

Contenu du pack de fils fin de nettoyage.

10 x fils fin de nettoyage de tube fin d'appareil auditif d'un diamètre inférieur à 0,9mm.

[Lien vers la fiche du produit](#)