

## **Cedis tube de 30 comprimés effervescents de nettoyage eC5.5 pour appareil auditif**

Le Cedis tube de 30 comprimés effervescents de nettoyage eC5.5 pour appareil auditif. Le comprimé nettoyant à l'oxygène actif purifie et enlève le cérumen de votre aide auditive.



**Marque :** Cedis

**Référence :** 87230

**Points de fidélité offerts :** 61

**Prix :** 9.00 €

**Critères associés :**

*Fonction Hygiénique :* désinfection, débouchage

**30 comprimés effervescents**

## **Tube de 30 comprimés effervescents de nettoyage pour appareil auditif.**

Nettoie en profondeur et décroche le cérumen efficacement des aides auditives contours d'oreille grâce à l'action de l'oxygène active.

## **Comment utiliser les comprimés de nettoyage pour appareil auditif ?**

Déposer dans un récipient la partie de votre appareil auditif à nettoyer qui ne contient pas d'électronique, comme l'embout auriculaire en acrylique. Verser de l'eau jusqu'à recouvrir la pièce à nettoyer et plonger le comprimé effervescent à l'oxygène actif. Laisser agir la solution détersive quelques minutes pour

profondement et efficacement décaper les dépôts de cérumen et autres impuretés de votre appareil auditif.

Récupérer l'embout auriculaire de votre appareil auditif et jeter la solution aqueuse souillée. Essuyer, frotter et sécher votre embout auriculaire qui a retrouvé son aspect propre d'origine. Il est conseillé de nettoyer en profondeur hebdomadairement l'embout auriculaire de votre aide auditive.

## **Contenu du colis :**

1 x Tube contenant 30 comprimés effervescents pour nettoyer votre appareil auditif.

[Lien vers la fiche du produit](#)