

## **Dôme miniFit Power 8mm appareil auditif OTICON**

Dôme miniFit Power 8mm appareil auditif OTICON Pack de 10 tétines Oticondôme Power 8mm



**Marque :** Oticon

**Référence :** 125922

**Points de fidélité offerts :** 48

**Prix :** 12.00 €

### **Critères associés :**

*Pièce détachée appareil auditif :* Dome appareil auditif Oticon

## **Dôme miniFit Power 8mm appareil auditif OTICON**

Dôme miniFit Power 8mm appareil auditif OTICON  
Pack de 10 tétines Oticon

Diamètre collerette extérieure 8mm

Exclusif pour les modèles Oticon suivants :

Les Dômes Oticon miniFit équipent les aides auditives avec écouteurs déportés et tubes fins DesignRITE, miniRITE et RITE (Oticon Ria, Ria2, Nera, Nera2, Alta et Alta2)

### **Entretien quotidien du dôme pour appareil auditif Oticon :**

Nettoyez chaque jour l'écouteur. Utilisez le chiffon et éliminez toute trace de cérumen. Le dôme ne doit pas être nettoyé. Lorsque vous désirez en avoir un propre, retirez le dôme existant et placez-en un nouveau.

Oticon et [www.meilleureaudition.fr](http://www.meilleureaudition.fr) conseillons de changer le dôme au moins une fois par mois ou selon les conseils de votre audioprothésiste.

**Changement du dôme pour appareil auditif Oticon :**

Le dôme est simple à changer. Utilisez un ongle et tenez le bout du dôme. Retirez-le. Placez le nouveau dôme sur l'écouteur et vérifiez qu'il est solidement attaché.

[Lien vers la fiche du produit](#)