

Ecrin de séchage et nettoyage appareil auditif PerfectClean

Ecrin de séchage et nettoyage appareil auditif PerfectClean permet une élimination totale du cérumen et des impuretés des appareils auditifs.



Référence : PREFECTCLEAN

Points de fidélité offerts : 331

Prix : 139.90 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : séchage, désinfection, anti cérumen

PerfectClean

Ecrin de séchage et nettoyage appareil auditif PerfectClean

L'écrin de séchage PerfectClean est très efficace pour nettoyer vos aides auditives.

Avec ce système de nettoyage entièrement automatique, l'entretien de vos prothèses n'a jamais été aussi simple.

Finis les nettoyages manuels souvent trop compliqués pour les malentendants qui portent des aides auditives. La PerfectClean véritable innovation technologique, nettoie, sèche et désinfecte automatiquement tous types

d'appareil auditif, d'un simple geste. Elle élimine totalement la présence de cérumen et impuretés grâce au système breveté Power Vortex, obtenue par le contrôle permanent du flux de liquide et d'air chaud. L'écrin de séchage pour appareil auditif est doté d'un système de séchage breveté par air pulsé.

La lampe UV-C de l'écrin de séchage PerfectClean assure une désinfection complète de l'appareil auditif.

La désinfection par UV-C prévient des irritations du conduit auditif et assainie les prothèses auditives. Pour assurer les performances optimales de l'aide auditive jour après jour, nous recommandons une utilisation quotidienne de l'écrin de séchage et nettoyage PerfectClean.

Tous les soirs au coucher, vous poser vos aides auditives dans l'écrin de séchage et nettoyage PerfectClean, en prenant soin d'enlever la pile. Puis d'un simple appui sur le bouton tactile, le cycle complet de nettoyage se lance.

Un cycle complet (nettoyage + séchage et désinfection) dure 1 heure et s'arrête automatiquement lorsque le nettoyage est terminé.

L'écrin de séchage et nettoyage PerfectClean est compatible avec tous les types d'appareils auditifs : les contours d'oreille, les micro contours, les écouteurs déportés et les intras auriculaires.

Les recharges nettoyantes de l'écrin de nettoyage Perfectclean sont vendues séparément.

Résultats après utilisation clients (B.Chaix-Audioprothésiste)

95% des clients considèrent que la PerfectClean est le système de nettoyage qu'ils attendaient et le trouvent simple à utiliser.

70% des clients recommandent la PerfectClean® à leurs connaissances et amis appareillés.

100% des utilisateurs sont satisfaits par la conception du produit et trouvent le design très élégant.

Le contenu de la boîte Perfect clean pour aide auditive :

1 x écrin de nettoyage perfectClean

[Lien vers la fiche du produit](#)