

Spray nettoyant Bross'net 210 / 150ml pour appareil auditif

Spray nettoyant Bross'net 210 ml permet de dissoudre le cérumen stocké sur vos appareils auditifs. Il convient parfaitement aux intras-auriculaires et aux embouts de vos prothèses auditives



Référence : BROS210

Points de fidélité offerts : 38

Prix : 15.00 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage

Bross'net 210

Spray nettoyant Bross'net 210 pour appareil auditif

Spray nettoyant Bross'net pour appareil auditif.

Le spray nettoyant Bross'net permet de dissoudre le cérumen stocké sur vos appareils auditifs. Le spray nettoyant Bross'net est un produit complet puisqu'il est bactéricide, fongicide et désinfectant, il convient parfaitement aux intras-auriculaires et aux embouts de vos prothèses auditives .

Le jet à micro diffusion du spray nettoyant Bross'net assure un nettoyage complet des prothèses auditives. La brosse en silicone du spray nettoyant Bross'net permet une finition parfaite du nettoyage. Après deux minutes d'action, les appareils auditifs sont parfaitement nettoyés et peuvent de nouveau être efficaces.

Le spray nettoyant Bross'net est un produit indispensable pour conserver une propreté optimale de vos aides auditives.

Comment utiliser le spray nettoyant Bross'net.

Exercer une légère pression du spray nettoyant Bross'net pour humecter le pinceau. Appliquer sur l'extrémité de votre embout ou sur l'orifice de sortie de son s'il s'agit d'un intra-auriculaire et procéder à un léger brossage pendant le temps de la vaporisation du produit déposé. Attendre deux minutes, avant d'utiliser vos appareils auditifs.

Le spray nettoyant Bross'net 210 est d'une grande contenance de 150ml.

[Lien vers la fiche du produit](#)